

ENZY-CLEAN

Enzym-Reiniger Konzentrat

Gebrauchsanleitung:

Saugen Sie unmittelbar nach Benutzung eine handwarme wässrige Lösung von ENZY-CLEAN in die Kanäle ein und legen Sie das Endoskop in die Reinigungslösung . Beachten Sie auch die Reinigungshinweise des Herstellers und die Reinigungs- und Desinfektions-Richtlinien für die GI-Endoskopie der European Society of Gastrointestinal Endoscopy (E.S.G.E.).

Anwendungskonzentration:

Je nach Verschmutzungsgrad des Endoskops: 1 – 5 %

Einwirkzeit:

Je nach Verschmutzungsgrad des Endoskops: 15 bis 60 Minuten

Weiterbehandlung:

Anschließend spülen Sie das Endoskop mit Leitungswasser und desinfizieren es. ENZY-CLEAN ist mit allen Desinfektionsmittel verträglich.

Wichtiger Hinweis:

Nach der Desinfektion muß das Spülwasser restlos aus dem Endoskop entfernt werden. Vor Wiederverwendung Ihres Endoskops nach längeren Liegezeiten (> 2 Tage) empfiehlt sich eine erneute Reinigung mit anschließender Desinfektion.

Warnhinweis:

Produkt wirkt proteolytisch. Hautkontakt vermeiden (=Handschuhe tragen)
Spritzer auf Haut und Augen sofort mit viel Wasser abspülen.

Lagerung:

ENZY-CLEAN kühl lagern. Anwendungslösung nach Gebrauch (max.8 Std.)verwerfen.

Umweltverträglichkeit:

ENZY-CLEAN ist biologisch leicht abbaubar.

Hersteller:

CosmArt Laboratorium GmbH
Neuwiesenfeld 21
D- 64625 Bensheim
www.cosmart.de